

## Test de détection des Antigènes COVID-19



### Test de détection des Antigènes COVID-19 (Écouvillon nasal / nasopharyngé)

Le nouveau Dispositif de Test Rapide d'Antigène COVID-19 Rapid Response® est une méthode de détection efficace et rapide. En seulement 15 minutes, le test peut détecter les antigènes nucléoprotéiques viraux du SRAS-CoV-2 grâce à une interprétation visuelle. Le test est destiné à être utilisé avec des échantillons prélevés sur un écouvillon nasal et nasopharyngé dans les 6 jours suivant l'apparition des symptômes.

#### Procédure du test :


**Avant utilisation, laisser les tests et les échantillons revenir à température ambiante. Veuillez suivre attentivement la notice du produit pour le prélèvement des échantillons et la procédure.**

1. Ajoutez 10 gouttes de tampon dans le tube.
2. Prélevez un échantillon nasal / nasopharyngé.
3. Extrayez l'échantillon en le mélangeant avec le tampon.
4. Ajoutez 3 gouttes au dispositif.
5. Lisez les résultats à 15 minutes

#### Contenu du kit :

- 25 dispositifs de test
- Une bouteille de tampon
- Canules
- Écouvillons emballés individuellement
- Tubes et support de tube
- Notice du produit


#### Interprétation des résultats de test :

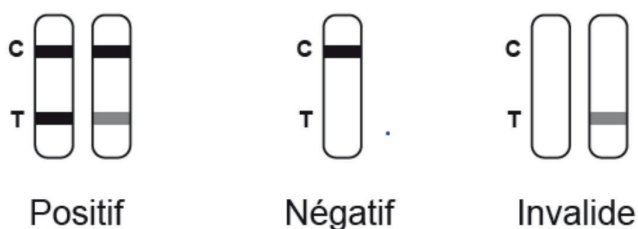

#### Collecte d'échantillons :

Écouvillon nasal (narines)

min 0,5 pouces

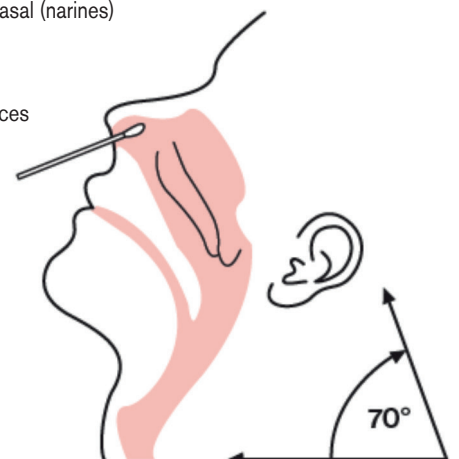

Distribué par

HENRY SCHEIN®  
02 47 68 90 00 | www.henryschein.fr

Rely on Us

Ce test est un dispositif médical de diagnostic in vitro pour la détection directe et qualitative des antigènes nucléoprotéiques viraux du SRAS-CoV-2. Ce dispositif médical de diagnostic est un produit de santé réglementé qui porte, à ce titre, le marquage CE.

Ce test ne fait pas l'objet de remboursement par les organismes d'assurance maladie.

Lire attentivement la notice avant utilisation. Fabricant : BTNX - 570 Hood Road Unit 23 Markham, ON - L3R 4G7 Canada.