

Désinfection rapide avec une lingette prête à l'emploi.

Lingettes désinfectantes de surface EuroSept®



VALEUR ET
QUALITÉ



FIABLE ET DIGNE
DE CONFIANCE



SÉLECTION
DU PRODUIT

Lingettes désinfectantes de surface EuroSept®



Avantages

- Activité antimicrobienne à large spectre
- Formule prête à l'emploi et excellente compatibilité des matériaux
- Désinfection rapide sans composés d'ammonium quaternaire (CAQ)
- Additifs optimisants innovants

Indications d'utilisation

Lingettes en molleton non pelucheux à teneur fortement réduite en alcool et prêtes à l'emploi. Parfum neutre ou citron disponible.

Données physiques

Conditions

Conditions	Concentration et temps d'exposition
Activité antibactérienne conformément aux normes EN 13727, EN 1276, EN 13697 (conditions insalubres)	conc. 1 min. (toutes tailles)
Protection contre le candida albicans conformément aux normes EN 13624, EN 1650, EN 13697 (conditions insalubres)	conc. 1 min. (toutes tailles)
Protection contre l'agent pathogène de la tuberculose (TB) (<i>M. terrae</i>) et les mycobactéries (<i>M. avium</i>) conformément à la norme EN 14348 (conditions insalubres)	conc. 1 min. (toutes tailles)
« Activité virucide à spectre limité » (virus enveloppés tels que le VHB, le VIH et le VHC, conformément aux normes EN 14476 et EN 16777) (conditions insalubres)	conc. 1 min. (toutes tailles)
« Activité virucide à spectre limité PLUS » (virus enveloppés tels que le VHB, le VIH et le VHC) et protection contre les norovirus, les adénovirus et les rotavirus, conformément aux normes EN 14476 et EN 16777) (conditions insalubres)	conc. 1 min. (toutes tailles)
Adénovirus (normes EN 14476, EN 16777) (conditions propres)	conc. 1 min. (toutes tailles)
Polyomavirus SV 40 (normes RKI/DVV) (conditions propres)	conc. 1 min. (toutes tailles)
Durées d'application des lingettes imprégnées : protection contre les bactéries et les candida albicans conformément à la norme EN 16615, et protection contre le VHA (conditions insalubres)	conc. 5 min. XS, S conc. 2 min. L conc. 1 min. M, XL

Ingrédients 100 g de liquide contiennent : 20,0 g de 1-propanol ; 5,0 g de 2-propanol.

*Ce produit s'appelait auparavant Lingettes désinfectantes de surface EuroSept Plus. L'emballage peut varier pendant la transition.

Lingettes désinfectantes de surface EuroSept Plus

Lingettes XL (30 x 30 cm), 70 pièces...Article n° (9884937)
Flowpack L (20 x 30 cm), 80 pièces...Article n° (9884949)
Lingettes M (15 x 30 cm), 140 pièces...Article n° (9884936)

Conteneur S (20 x 22 cm), 200 pièces...Article n° (9884002)
Recharge S (20 x 22 cm), 200 pièces...Article n° (9884003)
Conteneur XS (13x 20cm), 120 pièces... Article n° (9884197)
Recharge XS (13x20 cm), 120 pièces...Article n° (9884196)

Lingettes désinfectantes de surface EuroSept Plus Citron

Conteneur S (20 x 22 cm), 200 pièces...Article n° (9884951)

Recharge S (20 x 22 cm), 200 pièces...Article n° (9884950)

Produit complémentaire : Godet de distribution pratique.....Article n° (9796544)

Pour consulter notre **CATALOGUE DE PRODUITS DE LA MARQUE HENRY SCHEIN** et obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez vous rendre sur le site **WWW.HENRYSCHEIN.FR**.