



EuroSept® Plus Orange Oil Cleaner Orange Solvent

Nettoyant huile orange

- Solution de nettoyage spéciale pour cabinets et laboratoires à l'huile d'orange naturelle

Photo

Français

PROPRIÉTÉS :

- Nettoie de manière efficace
- Dissout la saleté facilement
- Excellentes propriétés dégraissantes
- Odeur d'orange agréable

CHAMPS D'APPLICATION :

Solution de nettoyage spéciale pour cabinets et laboratoires à l'huile d'orange naturelle pour éliminer les restes de ciment à l'oxyde de zinc, d'alginate et de plâtre, ainsi que la pâte à empreintes, les résidus de sang et autres salissures. Ce produit nettoie les porte-empreintes, les instruments, les plaques de verre, la céramique et fonctionne parfaitement sur acier inoxydable et autres surfaces.

UTILISATION :

Ne pas utiliser sur des surfaces en plastique. Ce produit n'est pas adapté aux surfaces laquées. Tester sur un endroit peu visible avant utilisation.

Attention : nettoyage très efficace.

REMARQUE PARTICULIÈRE :

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou des vertiges. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement

de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOLISON/un médecin/-. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne PAS faire vomir. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Contiennent: Orange Terpène, propane-2-ol.

L'ORANGE OIL CLEANER se compose, à l'inverse de l'ORANGE SOLVENT, d'huile d'orange de qualité supérieure pure et a, par conséquent, un pouvoir nettoyant plus élevé.

FORMES PHARMACEUTIQUES :

REF 988-2716	Orange Oil Cleaner 250ml, Bouteille ronde transparent
REF 988-2717	Orange Oil Cleaner Spray 250ml, Boîte en aluminium
REF 988-2718	Orange Solvent 500ml, Bouteille ronde avec tête de pulvérisation séparée transparent
REF 988-2719	Solvent 250m, Bouteille ronde transparent