

La désinfection sur laquelle vous pouvez compter.

Concentré de désinfection pour
instruments EuroSept® Xtra



VALEUR ET
QUALITÉ



FIABLE ET DIGNE
DE CONFIANCE



SÉLECTION
DU PRODUIT

Concentré de désinfection pour instruments EuroSept® Xtra



Avantages

- Large spectre d'activité
- Virucide limité
- Approprié pour les bains à ultrasons
- Sans aldéhyde ni phénol
- Formule non corrosive ayant une très bonne compatibilité avec les matériaux
- Formule concentrée pour réduire les emballages et obtenir une durabilité accrue

Indications d'emploi

Utilisé pour retraiter facilement les instruments avant stérilisation, ce concentré liquide est prévu pour la désinfection et le nettoyage manuel des instruments médicaux par processus d'immersion et présente un spectre d'activité complet contre les bactéries, les levures et les virus enveloppés.

Données matérielles

Conditions	Concentration et durée d'exposition
Bactéries selon les normes EN 13727, EN 14561 et VAH (conditions sales)	1,5% 15 min. 1,0% 60 min.
Candida albicans selon les normes EN 13624, EN 14562, VAH (conditions sales)	1,5% 15 min. 1,0% 60 min.
Bactéries et Candida albicans dans un bain à ultrasons selon les normes les normes DVV/RKI, EN 14476 et EN 17111 (conditions difficiles)	1,0% 5 min.
« Virucide limité » (virus enveloppés tels que les HBV, HIV, HCV) selon DVV/RKI, EN 14476 and EN 17111 (high conditions)	1,5% 15 min.
TB et mycobactéries (M. terrae et M. avium) selon les normes EN 14348, EN 14563 (conditions propres)	4,0% 30 min. 3,0% 60 min.

Ingrédients

100 g contiennent : 4,4 g de Didecyl-diméthylammoniumchloride, 2,75 g de N-(3-Aminopropyl)-N-dodécyl-propane-1,3-diamine

Concentré de désinfection pour instruments EuroSept Xtra

2L.....Article n° (9884863)

5L.....Article n° (9884864)

Pour consulter notre **CATALOGUE DE PRODUITS DE LA MARQUE HENRY SCHEIN** et obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez vous rendre sur le site **WWW.HENRYSCHEIN.FR**.