

Pouvoir nettoyant enzymatique inégalé.

Concentré nettoyant enzymatique
pour instruments EuroSept® Xtra



VALEUR ET
QUALITÉ



FIABLE ET DIGNE
DE CONFIANCE



SÉLECTION
DU PRODUIT

Concentré nettoyant enzymatique pour instruments EuroSept® Xtra



Avantages

- Pour le nettoyage actif des instruments médicaux avant désinfection
- Approprié pour les bains à ultrasons
- Formule non corrosive et moussant peu ayant une très bonne compatibilité avec les matériaux
- Flacons doseurs pratiques
- Formule concentrée pour réduire les emballages et obtenir une durabilité accrue

Indications d'emploi

Utilisez cette solution pour nettoyer les instruments contaminés par des protéines (sang ou salive) avant de les désinfecter.

Instructions

Pour préparer une solution d'1L, mélangez 980ml d'eau (à 40 °C maximum) avec 20ml de nettoyant. Si la contamination est importante, nettoyez mécaniquement les instruments auparavant. Placez immédiatement les instruments contaminés dans la solution de travail en position ouverte (ouverte et non fermée). Toutes les surfaces et renforcements nettoyés doivent être complètement mouillés par la solution. Si la solution est trouble ou si des particules sont visibles, changez la solution. Changez-la au moins une fois par jour. Après nettoyage, rincez avec soin les instruments, en utilisant de préférence de l'eau déminéralisée, séchez-les et passez à l'étape de désinfection des produits. Veuillez consulter les recommandations de retraitement du fabricant des instruments. Cette solution nettoyante peut également être utilisée dans un bain à ultrasons. Ne la mélangez pas avec des détergents ou des désinfectants. La solution prête à l'emploi peut être jetée avec les eaux usées. Ce produit est réservé à un usage professionnel.

Données matérielles

Concentration d'application	0,5 à 1 % pour les contaminations normales, jusqu'à 5 % pour les contaminations importantes
Durée d'exposition	5 à 30 minutes selon le degré d'encrassement
Contient	< Moins de 5 à 15 % de tensioactifs non ioniques, enzymes et parfums

Concentré nettoyant enzymatique pour instruments EuroSept Xtra

1L.....Article n° (9884858)

5L.....Article n° (9884236)

Pour consulter notre **CATALOGUE DE PRODUITS DE LA MARQUE HENRY SCHEIN** et obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez vous rendre sur le site **WWW.HENRYSCHEIN.FR**.