

Améliorez votre protection.

Concentré virucide de désinfection
pour instruments EuroSept® Xtra



VALEUR ET
QUALITÉ



FIABLE ET DIGNE
DE CONFIANCE



SÉLECTION
DU PRODUIT

Concentré virucide de désinfection pour instruments EuroSept® Xtra



Avantages

- Formule à haute efficacité avec un pH doux pour une excellente compatibilité avec les matériaux
- Approprié pour les bains à ultrasons
- Formule non corrosive moussant faiblement
- Sans aldéhyde ni peracides
- Formule concentrée pour réduire les emballages et obtenir une durabilité accrue

Indications d'emploi

Utilisé pour la désinfection manuelle et finale des instruments médicaux et chirurgicaux non critiques ou moyennement critiques par processus d'immersion. Ne convient pas à la désinfection finale de dispositifs médicaux critiques.

Données matérielles

Conditions	Concentration et durée d'exposition
Bactéries et Candida albicans (selon les normes EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562 et VAH) (conditions sales)	2,0 % 15 min. 1,0 % 60 min.
TbM (M. terrae) selon les normes EN 14348, EN 14563 (conditions propres)	2,0 % 15 min. 1,0 % 60 min.
« Virucide limité » (virus enveloppés tels que les HBV, HIV, HCV) selon la norme RKI/DVV (conditions sales)	2,0 % 15 min. 1,0 % 60 min.
Norovirus selon la norme EN 14476 (conditions sales)	3,0 % 15 min.
Adénovirus selon la norme EN 14476 (conditions propres)	1,5 % 60 min. 3,0 % 15 min.
Polyomavirus SV40 selon la norme RKI/DVV (avec des conditions)	3,0 % 15 min.
« Virucide » (virus non enveloppés tels que les adénovirus, norovirus et poliovirus) selon la norme EN 14476 (conditions propres)	3,0 % 30 min.
Champignons (A. brasiliensis) selon les normes EN 13624, EN 14562 (conditions propres)	3,0 % 60 min.
Spores (C. difficile) selon la norme EN 13704 (conditions propres)	3,0 % 60 min.

Ingrédients

100 g contiennent : 8,0 g de Didecylidiméthylammoniumchloride, 5,0 g de N-(3-Aminopropyl)-N-dodécyl-propane-1,3-diamine

**Concentré virucide de désinfection
pour instruments EuroSept Xtra**

5L.....Article n° (9884868)

Pour consulter notre **CATALOGUE DE PRODUITS DE LA MARQUE HENRY SCHEIN** et obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez vous rendre sur le site **WWW.HENRYSCHEIN.FR**.