

## Puissant désinfectant pour les surfaces sensibles.

**EuroSept<sup>®</sup> Xtra désinfectant concentré  
pour les surfaces sans alcool**



# EuroSept® Xtra désinfectant concentré pour les surfaces sans alcool



## Avantages

- Convient spécialement aux surfaces sensibles à l'alcool
- Large spectre d'activité sans résidu collant
- Convient aux systèmes de dosage
- Sans aldéhyde ni phénol
- Formule concentrée pour réduire les emballages et obtenir une durabilité accrue

## Indications d'emploi

Remplir l'eau avant le produit pour réduire la formation de mousse.

Solution	Concentration	Eau
1L	40ml	960ml
2L	80ml	1920ml
3L	120ml	2880ml
5L	200ml	4800ml
8L	320ml	7680ml
10L	400ml	9600ml

## Données physiques

### Conditions

Bactéries et Candida albicans (EN 13727, EN 13697, EN 13624, VAH, EN 16615) (conditions difficiles)

TbB (M. terrae) selon la norme EN 14348 (conditions propres) (conditions propres) (conditions difficiles)

« Virucide limité » (virus enveloppés tels que les HBV, HCV, HIV selon le test DVV/RKI) (conditions difficiles)

Rotavirus (EN 14476) (conditions propres)

Norovirus (EN 14476) (conditions difficiles)

Adénovirus (EN 14476) (conditions propres)

« Virucide limité plus » (EN 14476) (conditions propres)

Polyomavirus SV 40 (EN 14476) (conditions difficiles)

### Concentration et durée d'exposition

0,5 % 15 min.

2,0 % 15 min.

0,5 % 60 min.

1,0 % 60 min.

0,5 % 15 min.

0,5 % 15 min.

1,5 % 15 min. 1,0 % 60 min.

2,0 % 30 min.

2,0 % 30 min.

1,0 % 15 min.

### Ingrédients

100 g contiennent : 10,8 g de Chlorure de didécyl-diméthylammonium, 6,0 g de N-(3-Aminopropyl)-N-dodécyl-propane-1,3-diamine

\*Ne pas essuyer avant la fin du temps d'application.

**EuroSept Xtra désinfectant concentré  
pour les surfaces sans alcool**

5L.....Article n° (9884903)

Pour consulter notre **CATALOGUE DE PRODUITS DE LA MARQUE HENRY SCHEIN** et obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez vous rendre sur le site **WWW.HENRYSCHEIN.FR**.