

EUROSEPT® XTRA
LINGETTES DÉSINFECTANTES BIO L

**UNE
DÉSINFECTION
RAPIDE ET EFFICACE,**
AVEC UNE LINGETTE 100 % BIODÉGRADABLE



**EFFICACE CONTRE LES
VIRUS ET LES BACTÉRIES**



**LINGETTES D'ORIGINE
VÉGÉTALE 100 %
BIODÉGRADABLES**

COMPOSÉES DE FIBRES VÉGÉTALES 100 % BIODÉGRADABLES
SANS PHÉNOL | SANS ALDÉHYDE

Pour plus d'informations, consultez les instructions d'emploi du produit.

Commandez dès maintenant sur **HENRYSCHIEIN.FR**



**DES MARQUES ET DES
PRODUITS EXCLUSIFS**



**UNE QUALITÉ SUR LAQUELLE
VOUS POUVEZ COMPTER**



**DES ÉCONOMIES
INTELLIGENTES**

EUROSEPT® XTRA
LINGETTES DÉSINFECTANTES BIO L



Avantages

Des lingettes 100 % biodégradables
fabriquées à partir de fibres végétales

Des lingettes plus épaisses permettant
de traiter une plus grande surface avec
moins de lingettes

Une formule rapide et efficace*

Sans aldéhyde ni phénol

*Testées et jugées efficaces contre un large spectre de virus
et de bactéries, notamment SARM, TB, VIH-1 et H1N1



CONDITIONS	DURÉE D'EXPOSITION
Bactéricide, levuricide (y compris tests sur 4 sites) selon la norme EN 16615	60 secondes
Bactéricide, levuricide selon les normes EN 13727, EN 13697, EN 13624	30 secondes
Bactéricide, levuricide (y compris SARM) selon les normes EN 1276, EN 13697, EN 1650	60 secondes
Tuberculocide selon la norme EN 14348	60 secondes
Virucide limité selon la norme EN 14476	30 secondes
Virucide limité plus virucide selon la norme EN 14476	5 minutes

Instructions d'emploi

Lingettes désinfectantes de surface prêtes à l'emploi. Ouvrez le film protecteur sous le capuchon et retirez la première lingette de l'emballage. Utilisez la lingette retirée aussi rapidement que possible et ne l'utilisez pas une deuxième fois. Humidifiez complètement les surfaces avec les lingettes pré-imprégnées et répartissez la solution désinfectante. Maintenez la surface humide pendant toute la durée d'exposition. Dans le secteur alimentaire, nettoyez les surfaces avec de l'eau potable. Si nécessaire, essuyez les surfaces avec un chiffon hygiéniquement propre après la désinfection. Réservé exclusivement à un usage professionnel. Gardez le capuchon du paquet et le film protecteur parfaitement fermés.

Ingredients

Éthanol 40,0 %, proan-2-ol 9,5 %, chlorure de didécyldiméthylammonium 0,25 %, essence, inhibiteurs de corrosion

Informations complémentaires

Stabilité : 2 ans dans l'emballage d'origine ; 28 jours après la première ouverture si l'emballage est hermétiquement refermé.
DM : Classe IIa

Lingettes désinfectantes bio EuroSept® Xtra L Henry Schein®

FLOWPACK L (20 x 22cm) 80 unités

(9889964)

Pour plus d'informations, consultez les instructions d'emploi du produit.

Commandez dès maintenant sur **HENRYSCHN.FR**